

Référence et désignation des articles concernés :

SPWC Système de propulsion PUL W de stabilisation - COURT (paire)

SPWL Système de propulsion PUL W de stabilisation – LONG (paire)

partie supérieure

partie inférieure



Vous avez acheté notre système PUL W et nous vous en remercions. **Lisez attentivement cette notice.** Les matériaux utilisés pour la fabrication ont une parfaite tolérance biologique validée dans le cadre de la réglementation relative aux dispositifs médicaux. Vendu propre mais non stérile, il est recommandé, avant toute utilisation, d'appliquer les règles de nettoyage en vigueur dans les laboratoires et cabinets dentaires. Veuillez observer les instructions de stockage.

#### Indication technique :

Sert à fabriquer un appareil orthodontique « PUL W amovible de contention anti-récidive » composé de deux gouttières en résine. Une paire de système (bielles identiques) est fixée sur les tubes d'armatures à l'aide de tiges-boules support.

#### Attention :

L'utilisation est limitée dans le cadre d'un traitement orthodontique. L'utilisation chez le patient, relève de la responsabilité du praticien.

#### Indication et bénéfice clinique :

Stabilisation anti-récidive post-traitement orthodontique.

#### Contre-indication :

**Ne convient pas aux personnes allergiques au Nickel et Cobalt**

## Laboratoire

### MONTAGE : Il est recommandé d'avoir pris connaissance du protocole de fabrication auprès de PUL Concept

Le montage consiste à relier la gouttière inférieure à la gouttière supérieure (préalablement fabriquées selon le protocole de PUL Concept) avec le système PUL W (ref SPWC/SPWL) et des attaches (ref TBS0.9) sur articulateur en position corrigée (selon spécifications du praticien).

- Mettre l'attache dans la partie du système prévue à cet effet et insérer l'ensemble dans le tube d'armature de la gouttière en respectant la distance permettant la libre articulation du système (1mm), puis replier l'attache et couper l'excédent.
- Attacher de cette manière la partie supérieure du système sur la gouttière supérieure et la partie inférieure du système sur la gouttière inférieure

## Praticiens

### ACTIVATION : Il est recommandé d'avoir assisté à une formation clinique sur le concept PUL auprès du Dr CALLABE

L'activation du système PUL W se fait à l'aide de pinces orthodontiques.



Une pince 3 becs larges pour fermer le W afin de raccourcir le système. Une pince plate pour ouvrir le W afin d'allonger le système.

## Patients

#### PORT DE L'APPAREIL :

L'appareil doit être porté toutes les nuits pendant 12 mois, puis une nuit sur deux pendant 6 mois, puis une nuit sur trois pendant 6 mois, puis une nuit par semaine pendant 12 mois minimum.

#### NETTOYAGE :

Frotter l'appareil sous l'eau avec une brosse à dents (différente de celle pour les dents) pour éviter le tartre.

#### PRÉCAUTIONS :

Quand on enlève l'appareil, il faut toujours le placer dans sa boîte pour le protéger. Ne jamais le mettre dans un mouchoir ni dans un essuie-tout, il risque d'être jeté à la poubelle. En cas de blessure des joues, glisser une compresse roulée entre la joue et le système métallique. Ne pas poser l'appareil à la portée d'un chien, il pourrait le mordre et le casser.

Tout incident grave survenu en lien avec un dispositif médical de la gamme Pul Concept® doit faire l'objet d'une notification immédiate à votre professionnel de santé et à la société PUL Concept au +33 2 54 75 54 80 Email : [pulconcept@pulconcept.com](mailto:pulconcept@pulconcept.com) ; ainsi qu'à l'autorité de santé compétente de votre pays.



PUL Concept  
ZA Les Plantes  
7 rue Pierre et Marie Curie  
41140 NOYERS SUR CHER – France  
02.54.75.54.80  
[pulconcept@pulconcept.com](mailto:pulconcept@pulconcept.com)



Dispositif médical



Stockage protégé du soleil



Stocker dans un endroit sec



Contient du Nickel et du Cobalt



Réutilisable un seul patient



Date de fabrication