

"Un outil de communication en ODF"

"L'Ortho'class: Information, motivation, protection"


Mode d'emploi:

1- Le jour de la consultation et le plan de traitement: Information

Le jour du plan de traitement nous donnons la fiche seule de l'appareil prévu, exemple: "L'appareil amovible fonctionnel de propulsion."

Nous entourons les informations importantes et demandons au patient et aux parents de la lire chez eux avant le prochain rendez-vous des empreintes:

- (-l'appareil va te gêner les 1° jours pour parler et avaler ta salive etc...
- il est normal que l'appareil ne tienne pas bien sur les dents etc...
- quand le porter?
- nettoyage?
- Etc...)

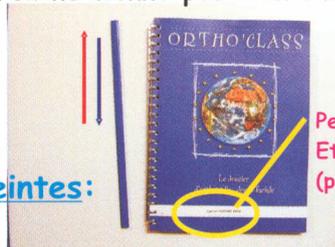

Personnalisation:
Etiquette collée
(prénom et nom du



Personnalisation:
Ecrire ou Imprimer à
l'imprimante Laser les
coordonnées du patient
et du praticien



2- Le jour des empreintes:

Après la prise des empreintes et des photos, nous donnons le dossier après l'avoir personnalisé. Nous insérons les fiches qui correspondent au plan de traitement.

Nous demandons à l'enfant de les lire chez lui avec ses parents, avant le prochain rendez-vous.

3- Le jour de la pose de l'appareil: Motivation


Le jour de la pose, nous collons les photos et le plan de traitement sur les fiches "photos" et "analyse céphalométrique".

Après la pose de l'appareil, nous vérifions si les informations ont été bien comprises par le patient et ses parents en relisant ensemble la fiche.



Intérêt des photos:

- Dentistes traitants
- Dentistes conseils
- Stomato, orthophonistes, ORL, etc...
- transfert de traitement
- réunions familiales
- Etc...

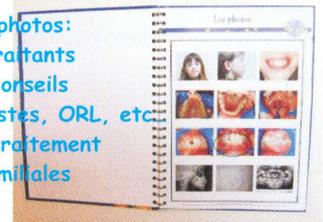

4- A chaque rendez-vous de contrôle: Motivation

A chaque rendez-vous de soin, nous motivons en montrant les photos de début du traitement, et les fiches du fixe et des élastiques:


"Appareil fonctionnel bien porté = moins de bagues et d'élastiques"

Protection médico-légale:
Noter et entourer les caries,
taches, fractures,.....

5- Avant le passage à la prochaine étape: exemple: pose du multiattache

Avant le passage à une phase du traitement, nous demandons au patient de lire chez lui la fiche qui concerne la prochaine séance (ex: appareil fixe ou élastiques ou contention etc..) avant le prochain rendez-vous.


Evaluation du
brossage :
Définition des
responsabilités en
cas d'apparition de
décalkification =
Protection

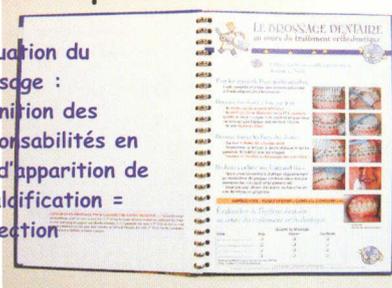

Information,
participation et
reconnaissance des
correspondants qui
motivent et apprécient la
difficulté du traitement
et les résultats obtenus.
Le jeune patient garde le
contact avec son
praticien traitant, "le
gardien de son sourire"



Information des parents: Au cas où
l'enfant se présente seul (voisin).
Noter un compte-rendu de la séance
de soins.
Noter si changement de mode de
port d'un appareil ou des élastiques,
etc...
Questions=Réponses
Noter chocs, chutes, etc.....

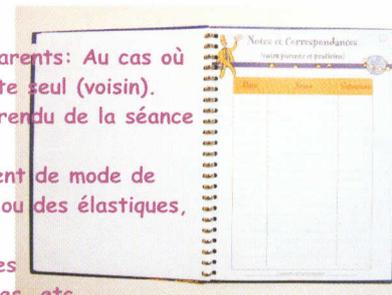

Autres fiches importantes: "Le Brossage", "Le bilan semestriel", "La correspondance"

L'Orthoclass existe aussi en version "Pocket".

Renseignement auprès de l'éditeur: Lexicom-conseils - Tél: 02 47 20 52 92.