


Septembre 2016

**Choisir la bonne longueur de système :**

**Mettre l'occlusion en classe 1** - Prendre la mesure entre 2 repères spécifiques et choisir la longueur des systèmes en conséquence.


1er repère : En distal de la molaire supérieure  
 2ème repère : Entre prémolaire et canine inférieure

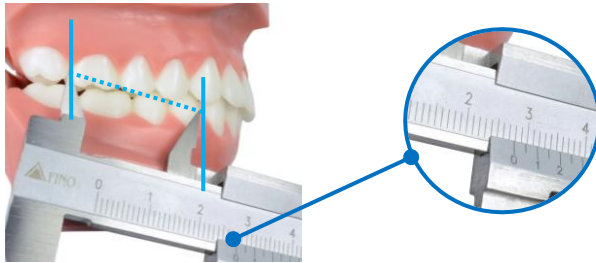

**CHOIX DU SYSTEME :**  
 Mesure inférieure ou égale à 30mm :  
**SYSTEME COURT**  
 Mesure supérieure à 30mm :  
**SYSTEME LONG**

**Mise en place d'un stop**

A l'aide d'un positionneur de stop, placer le stop (vis desserrée) sur l'arc mandibulaire en avant de la 1ère prémolaire, puis visser.

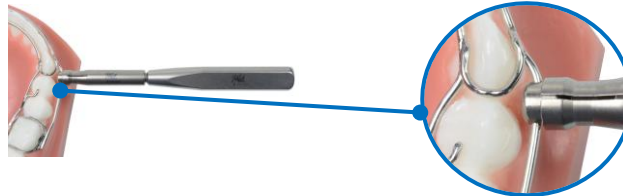

**Mise en place d'un système : Attention, il y a 2 systèmes, le gauche et le droit !**

*Attache supérieure*



Insérer la tige boule dans la partie supérieure du système



Insérer l'ensemble dans la bague, tirer au maximum en pliant la tige à l'aide de la pince de Weingart

*Attache inférieure*


Demander au patient d'ouvrir grand la bouche



Ouvrir la boucle inférieure avec une pince d'angle



Insérer la boucle sur l'arc inférieur en distal du stop

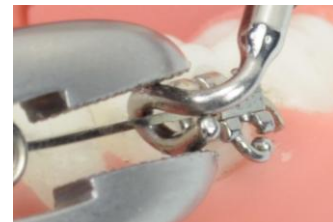

Refermer la boucle au maximum en essayant de croiser le système à l'aide la pince de Weingart

**Pour augmenter la propulsion, rien de plus simple. Il suffit de desserrer le stop, de le distaler d'1 ou 2 mm et de le resserrer.**



Vidéos explicatives disponibles sur **facebook** Aimez notre page PUL Concept et sur **YouTube**

Informations et mode d'emploi du PUL'Fix sur : [www.pulconcept.com](http://www.pulconcept.com)

FABRICATION FRANCAISE