


Protocole de montage des systèmes réglables PUL3

Une cire d'occlusion devra être prise dans la position mandibulaire la plus postérieure.

Système supérieur
en appui sur la gouttière
pour permettre une avancée
maxillaire.

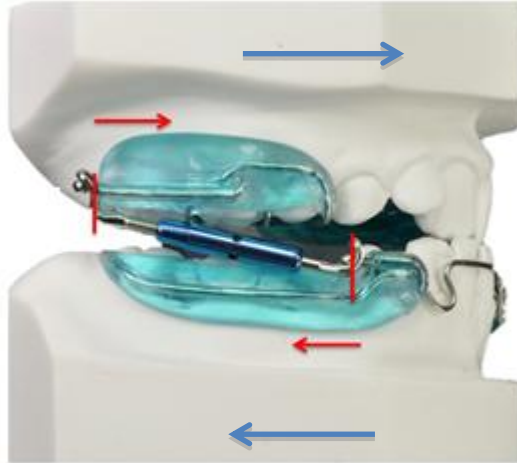


Système inférieur
en appui sur la tige-boule
pour empêcher le
proglissement mandibulaire.

Réglage des gouttières PUL3

Le ressort intégré s'active en traction : le réflexe de proglissement mandibulaire active le ressort qui entraîne vers l'avant le prémaxillaire.



Résine arrondie derrière les incisives
supérieures pour permettre leur
alignement.

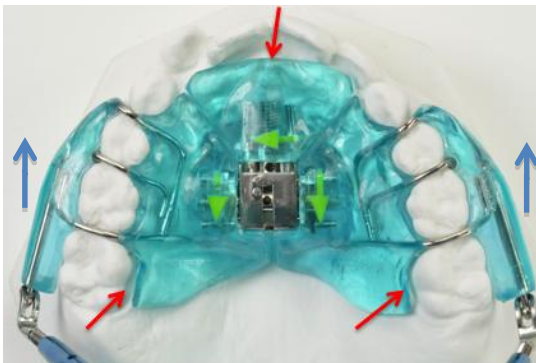

Armature passant en mésial des 16 et
26, pour éviter l'ancrage et permettre
une avancée du prémaxillaire.



Résine dégagée derrière les incisives
inférieures, pour permettre leur
redressement lingual.