

**Protocole de montage du ressort mandibulaire
avec le système télescopique PUL1**

La partie conique (spires jointes) du ressort mandibulaire doit être encastrée au niveau de l'armature pour limiter les risques de casse.



Pour encastrer le ressort, faire un fraisage avec une fraise boule de 2 mm de diamètre.



Une fois encastré, maintenir le ressort légèrement comprimé et le bloquer en pliant la tige support dans cette position.



Pour un montage sans ressort, bloquer le système inférieur en le positionnant à angle droit, cela donnera le jeu nécessaire pour un bon fonctionnement.

